


「使用準備完了ランプ」の状態を毎日確認する


・ステータス・インジケータに「砂時計のマーク」が点滅していれば使用可能な状態です。ピープ音が聞こえ、「×」印が点滅または点灯している場合は注意が必要です。
 このような場合は、バッテリー装着セルフテストを行ってください。それでも問題が解決しない場合は、ご購入いただきました販売店へご連絡下さい。

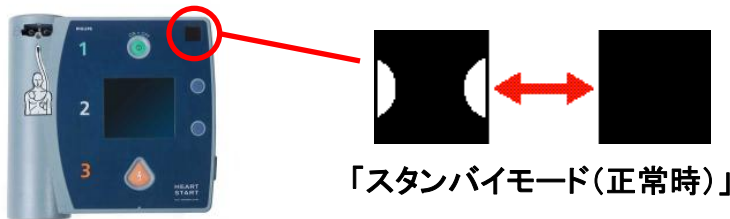

* バッテリー装着セルフテスト

(何か問題が起これたら、まずはこちらを行って下さい)

機器に装着されているバッテリーを一度取り外し、再度挿入してください。
 自動的にセルフテストが開始されます。画面メッセージに従って、セルフテストを完了して下さい。
 次にAEDがスタンバイ状態になることを確認して下さい。

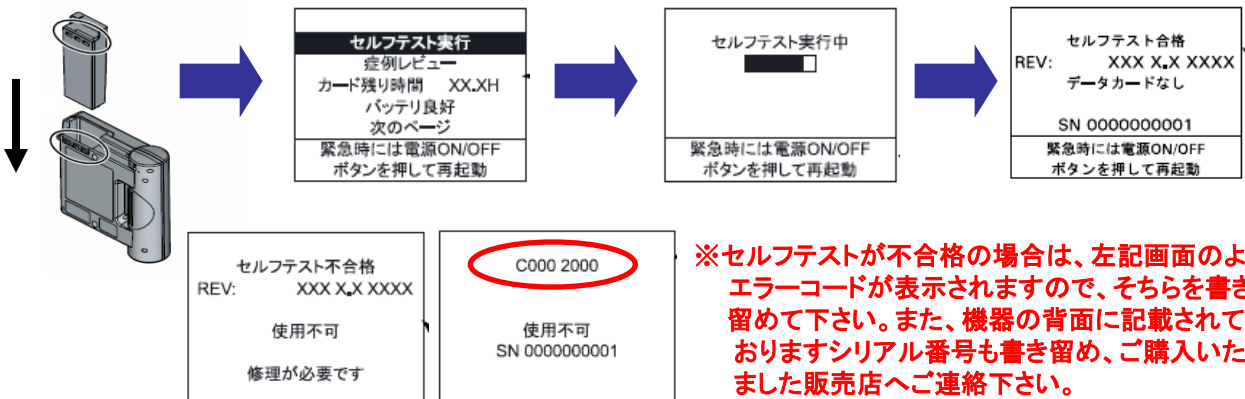

※セルフテストが不合格の場合は、左記画面のようにエラーコードが表示されますので、そちらを書き留めて下さい。また、機器の背面に記載されており、シリアル番号も書き留め、ご購入いただきました販売店へご連絡下さい。

1. 緑の電源ON/OFFボタンを押すと電源が入ります。



「パッドを胸に装着して下さい。
ランプが点滅しているソケットに
パッドのコネクタを接続して下さい。」

2. 電極パッドを体に貼ります。コネクタを接続します。



2つのパッドを貼りコネクタを接続すると、AEDが自動で解析を開始します。

「心電図を解析中です。身体に触れないで下さい。」

ショックが必要な場合

「ショックが必要です。
身体から離れて下さい。」

ショックが不要な場合

「ショックは不要です。
「一時中断中です。」

「胸骨圧迫と人工呼吸をしてください」

3. ショックボタンを押します。



電気ショック




「点滅しているオレンジのボタンを押して下さい。」

「ショックが完了しました。」

「一時中断中です。」

「ただちに胸骨圧迫と人工呼吸をして下さい。」

・全体の流れ

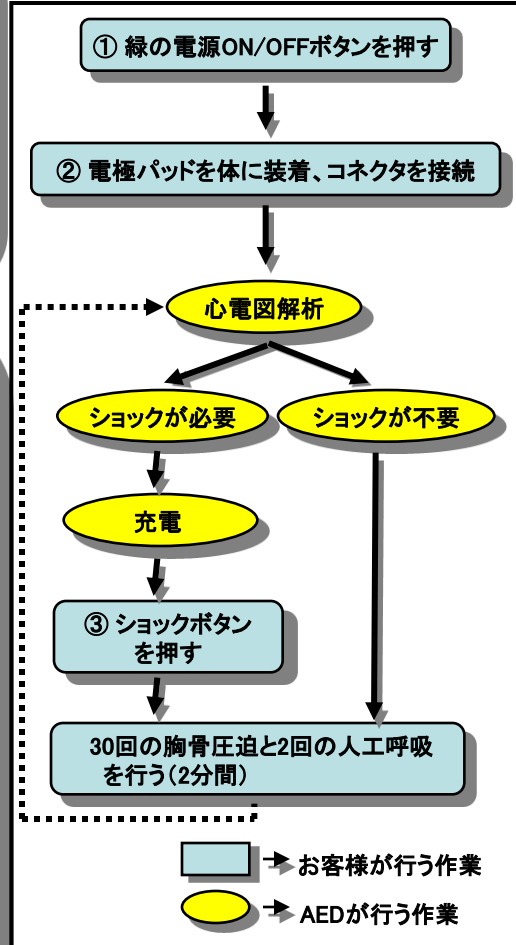

胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を交互に2分間行います。



*** 救急車が到着するまでAEDの電源は入れたまま！
電極パッドは貼ったままにしてください！！**

