


レビューエクスプレス3.1(無償版)の簡易操作方法


①Review express3.1を開くと
右記の画面が表示されます。

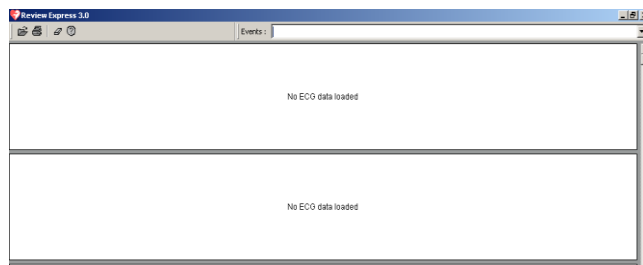


②画面左上の  をクリックすると
③の画面が表示されます。




③ECGデータが保存されている
除細動器を選びます。
XLデータカードアイコンを選択

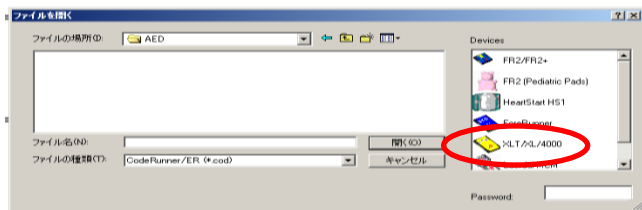

④データカードに保存されている
XLのECGデータ一覧が表示され
れます。

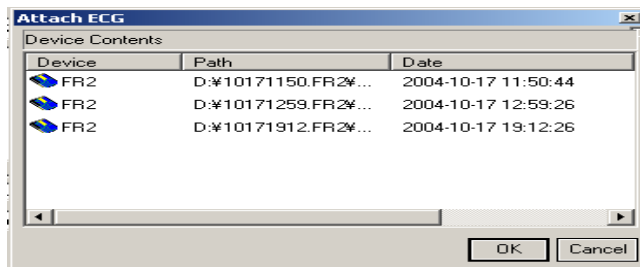

⑤開きたいデータダブルクリック
するとECGデータが開きます。

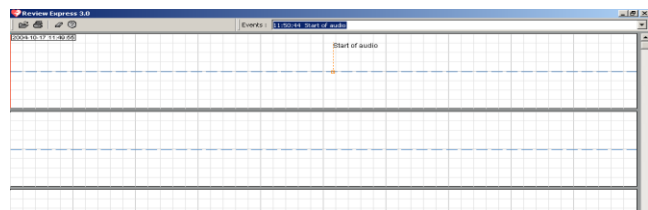

⑥画面右上のEventをクリックする
と時間軸によるイベントが表示が
されます。
イベントをクリックするとその時の
ECG波形が表示されます。




レビューエクスプレスでECGデータを印刷する方法


⑦画面左上のプリンタ
をクリックします。



画面左上アイコン⇒

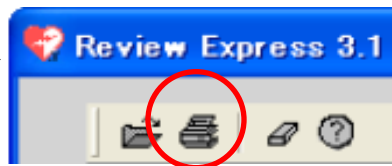

⑧印刷設定画面のSelectにて
Time range、Pre/Post ECG、Entire ECG
のどれかを選択

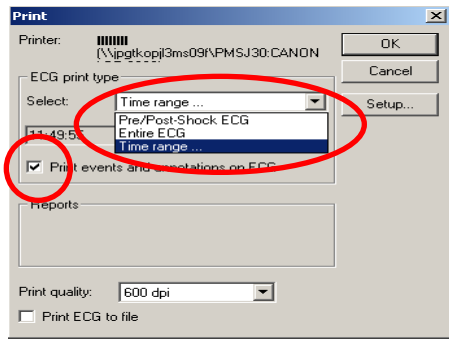

Time range/

印刷する時間を選択できます。

何も選択しなければ表示されている全ての波形を印刷します。


Pre/Post ECG/

ECG記録の最初と最後の約7秒を印刷します。

Entire ECG/

表示されている全ての波形を印刷します。

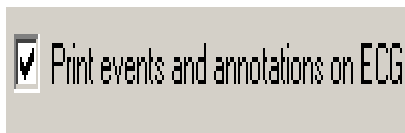

⑨ECG波形にイベントやアノテーションを記録しない場合はチェックを外してください。





レビューエクスプレスでECGデータを削除する方法

データカードのECGデータを削除する方法は2種類あります。


①PCのマイコンコンピュータからリムーバブルディスク(D:)を選択しデータを削除

- ①PCのデスクトップ上からマイコンコンピュータ  をクリック
- ②リムーバブルディスク(D:)をクリック
- ③データカードのデータを護美箱  に入れる。

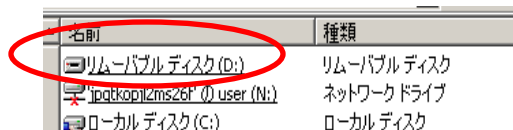


②レビューエクスプレスを開いて  (Erase: 削除)を選択してデータカードの全データを削除




①レビューエクスプレスの画面左上の  (Erase: 削除データカードを選択 (FR2/FR2+ Datecardを選択))

②AEDの機種が表示されるので削除したい機種を選択してEraseをクリックします。

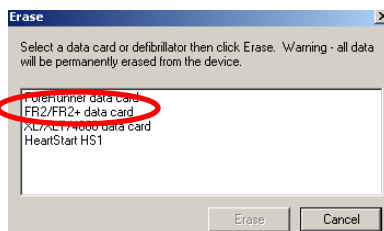

③データカードに記録されていた全データを削除してよいか2度聞いてきますので問題なければYesをクリックします。

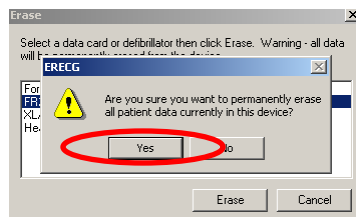

④データは削除されました。




Review Expressをインストールしていると 左記アイコンが表示されます。


Eventreview画面



ECG波形呼込
印刷
データ削除
Help

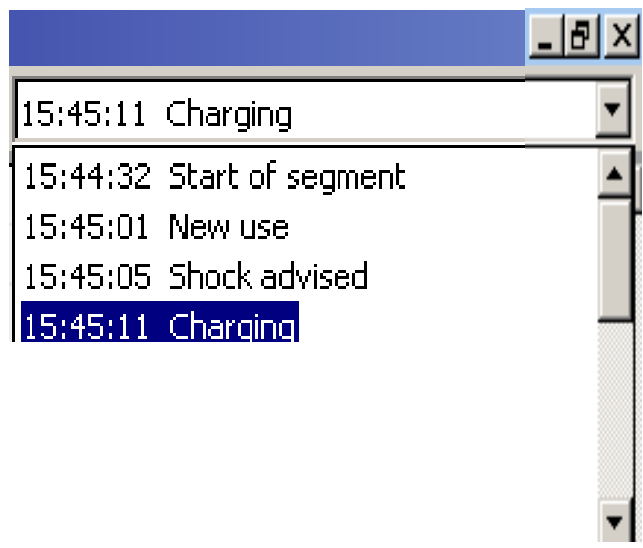

Eventを開くと保存されているイベントが時間軸で表示されます。

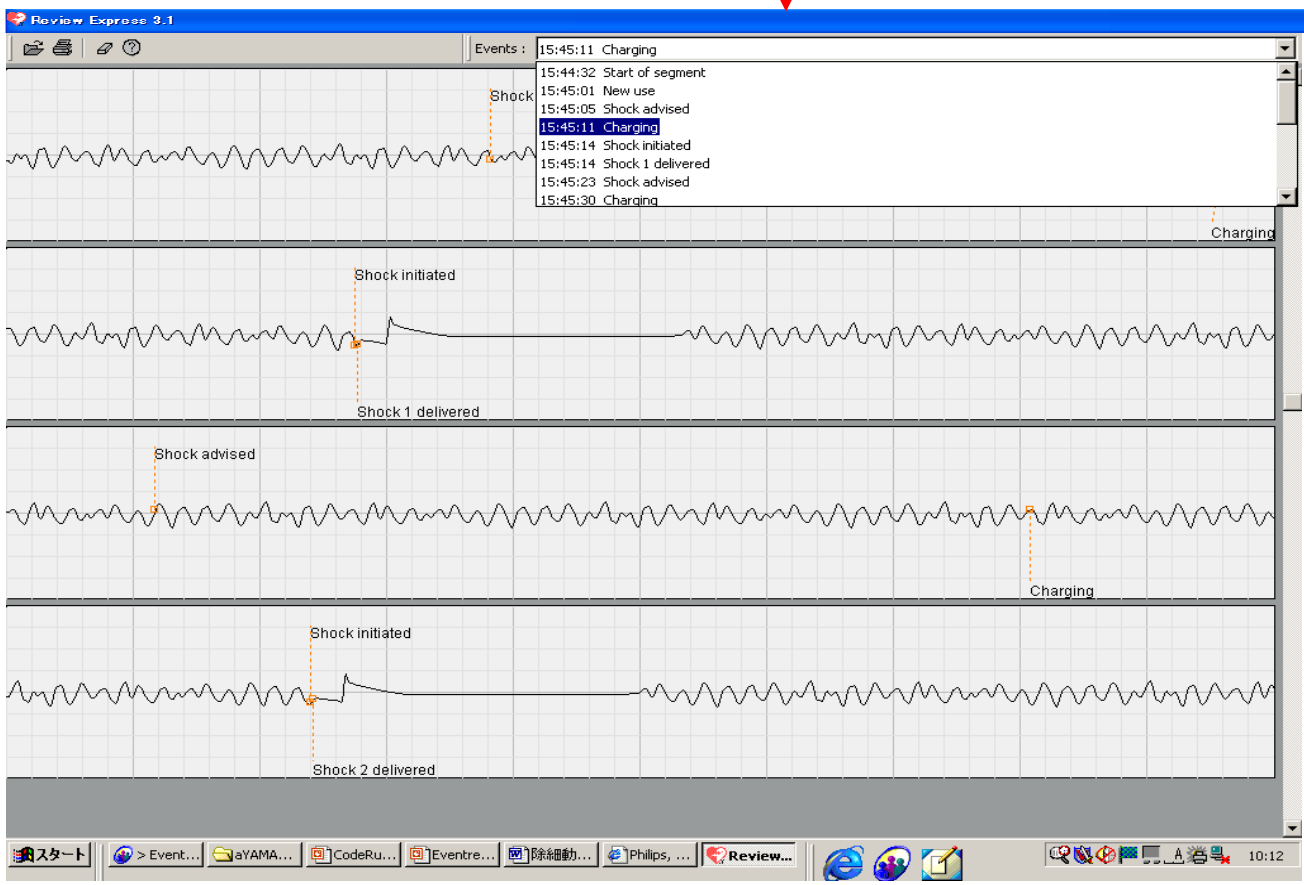

Review express3.1(無償版)のご注意

＜できること＞記録された生データファイルを読み込み

1. 画面に心電図波形とイベントを表示します。
2. 画面に表示された心電図波形とイベントを印刷できます。
3. イベントの表記は英語です。

＜できないこと＞

- ・画面表示された心電図波形とイベントをPCのハードディスクに保存できません。

＜ご注意ください＞

Review express3.1では毎回生データファイルを読み込み、心電図波形とイベントがPCの画面に表示され、印刷できます。毎回生データファイルを読み込む必要があります。

(尚、有償版のEvent Reviewソフトウェアではイベントは日本語表記になり、心電図波形とイベントを保存でき、記録音声の再生【FR2の場合】ができます)